

EXTRAKTIONSPUFFERRÖHRCHEN

EINWEGTUPFER

TESTKASSETTE

# 6 SCHRITTE ANLEITUNG ZUM ANTIGEN-SELBSTTEST


## POSITIV?

DIE SCHULLEITUNG INFORMIERT 1450 ODER  
DIE ÖRTLICHE GESUNDHEITSBEHÖRDE.

## NEGATIV?


HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN  
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!

# 1

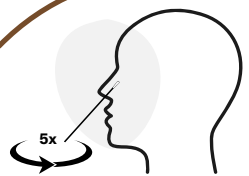

- Tupfer ca. 2,5 Zentimeter in ein Nasenloch einführen
- Das Stäbchen 5 Mal drehen, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen
- Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

# 2

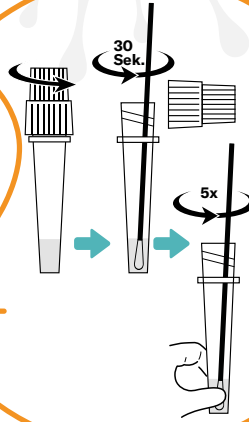


- Rörchen mit Pufferlösung aufschrauben, ohne es zu drücken
- Das Stäbchen einführen und 30 Sekunden umrühren
- Rörchen zusammendrücken und währenddessen das Stäbchen mindestens 5 Mal drehen
- Aufpassen, dass Flüssigkeit nicht aus dem Rörchen spritzt!

# 3




- Stäbchen entnehmen und dabei Rörchen zusammendrücken
- Kappe mit Tropferspitze fest aufdrehen
- Rörchen wirbeln und schütteln

# 4

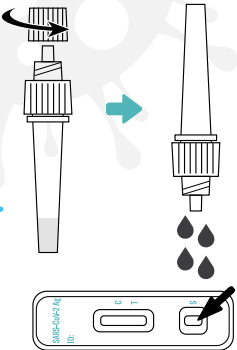

- Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen
- Kappe von der Tropferspitze abdrehen
- Rörchen vorsichtig zusammendrücken und 4 Tropfen auf Testkassette tropfen (Vertiefung S)


# 5



- 15 Minuten warten
- Das Ergebnis ablesen

# 6

Ergebnisinterpretation

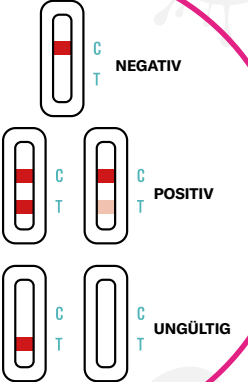

- NEGATIV
- POSITIV
- UNGÜLTIG